



ACCU-CHEK, ACCU-CHEK MOBILE, ACCU-CHEK SMART PIX, ACCU-CHEK 360°, ACCU-CHEK CONNECT et FASTCLIX sont des marques de Roche.

CONTINUA, les logos CONTINUA et CONTINUA CERTIFIED sont des marques commerciales, des marques de service ou des marques de certification de Continua Health Alliance. CONTINUA est une marque commerciale déposée dans certains pays où ce produit est distribué.

Les logos USB-IF sont des marques de l'organisation Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.

© 2020 Roche Diabetes Care

Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany

www.accu-chek.com

Mise à jour : 2020-01

ACCU-CHEK®

ACCU-CHEK® Mobile



Manuel d'utilisation et guide de démarrage

Système de surveillance de la glycémie



Enregistrez votre lecteur de glycémie en ligne.*









Plus d'information au chapitre 18.

*Pas disponibles dans tous les pays

ACCU-CHEK®

⚠ IMPORTANTES REMARQUES À PROPOS DE LA MESURE DE GLYCÉMIE

Une réalisation incorrecte de la mesure de glycémie peut générer des résultats erronés qui peuvent à leur tour conduire à une décision thérapeutique erronée et entraîner des effets néfastes graves pour la santé. **Respectez** par conséquent les instructions suivantes pour effectuer correctement une mesure de glycémie.

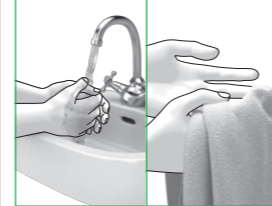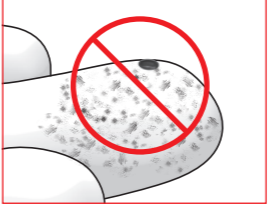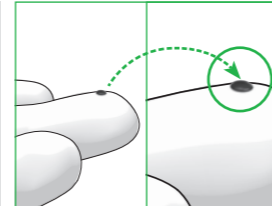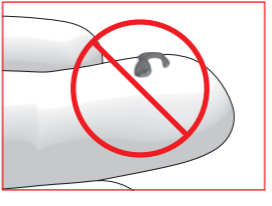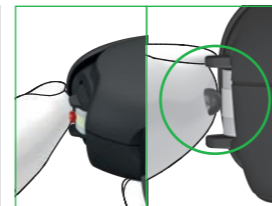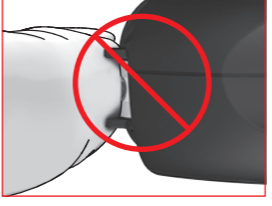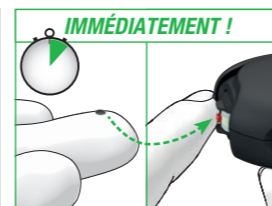	Faire	Ne pas faire	Explication
1	 Avant la mesure de glycémie : Lavez-vous les mains à l'eau chaude et au savon et rincez-les soigneusement afin d'éliminer tous les résidus visibles et invisibles de glucose provenant notamment de restes de nourriture ou de boisson. Essuyez-vous bien les mains avec un chiffon propre.	 N'effectuez aucune mesure de glycémie si le site de piqûre n'est pas lavé, est souillé ou collant (p. ex. en raison de la présence de résidus de glucose provenant de restes de nourriture ou de boisson).	Une mesure de glycémie réalisée de manière erronée peut conduire à l'obtention de résultats faussement élevés et entraîner l'administration d'une dose trop élevée d'insuline. Les causes suivantes peuvent générer des résultats faussement élevés : <ul style="list-style-type: none"> • Vos doigts ne sont pas lavés, sales ou collants. • Si la goutte de sang s'écoule sur le doigt ou si la goutte de sang est étalée sur la zone réactive, le risque de souillure de la zone réactive augmente (p. ex. en raison de la présence de résidus de glucose provenant de restes de nourriture ou de boisson). • Le doigt est appuyé sur la zone réactive. • Secousses ou tremblements au cours de la mesure de glycémie. • La mesure de glycémie n'est pas immédiatement réalisée ou le doigt effleure les butées pendant une durée excessive. Veuillez prêter attention au signal sonore. Le signal sonore vous aide à obtenir un résultat glycémique fiable.
2	 Utilisez toujours une goutte de sang frais bien formée.	 N'effectuez aucune mesure de glycémie avec une goutte de sang étalée ou mal formée. Veillez à ne pas étaler la goutte de sang sur la zone réactive.	
3	 Déposez la goutte de sang uniquement au centre de la zone réactive. Effleurez la zone réactive située entre les butées à l'extrémité de la cassette uniquement avec la goutte de sang. Pour ce faire, effleurez légèrement les butées avec le doigt sans exercer de pression. Maintenez le doigt le plus immobile possible.	 N'appuyez pas le doigt sur la zone réactive située entre les butées à l'extrémité de la cassette. Évitez toute secousse ou tremblement.	
4	 IMMÉDIATEMENT ! Veillez à appliquer le sang sur la zone réactive immédiatement après avoir obtenu la goutte de sang. Enlevez votre doigt de la cassette-test dès que le signal sonore retentit et que le message <i>Mesure en cours</i> s'affiche à l'écran. Remarque : vous n'entendez les signaux sonores que s'ils ont été activés. Voir <i>Réglage des sons</i> dans le manuel d'utilisation.	 NE PAS ATTENDRE ! N'attendez pas pour appliquer la goutte de sang sur la zone réactive. Veillez à ne pas maintenir les butées au niveau de votre doigt une fois que le signal sonore a retenti et que le message <i>Mesure en cours</i> s'est affiché à l'écran.	

ACCU-CHEK® Mobile



Guide de démarrage

Pour commencer

ACCU-CHEK®



- 1 Bouton de déclenchement (armer et piquer)
- 2 Touche Marche/Arrêt et touche de Sélection
- 3 Touches Haut/Bas
- 4 Fenêtre indiquant le nombre de lancettes disponibles
- 5 Levier pour mise à disposition d'une nouvelle lancette
- 6 Embout de réglage destiné à régler la profondeur de piqûre
- 7 Capot de protection fermé (en dessous à droite : ouvert)
- 8 Zone réactive (positionnée à l'extrémité de la cassette pour la mesure)
- 9 Cartouche de lancettes
- 10 Cran de sécurité permettant de dissocier l'autopiqueur du lecteur
- 11 Cran de sécurité permettant d'ouvrir le couvercle du compartiment de la cassette
- 12 Capot de protection
- 13 Cassette-test
- 14 Butées



Le lecteur et l'autopiqueur sont conçus exclusivement pour un usage personnel !


Leur utilisation est réservée à la mesure de glycémie d'une seule personne. Il existe un risque de transmission d'infections si le lecteur ou l'autopiqueur sont utilisés par d'autres personnes, y compris les membres d'une même famille, ou si les professionnels de santé emploient le lecteur pour effectuer des mesures de glycémie ou l'autopiqueur pour prélever le sang chez plusieurs personnes.

Ce guide de démarrage ne remplace pas le manuel d'utilisation détaillé de votre système de surveillance de la glycémie Accu-Chek Mobile. Veuillez vous conformer aux consignes de sécurité figurant dans le manuel d'utilisation du lecteur ainsi que dans la notice d'utilisation de la cassette-test.

1. Mettez le lecteur en marche



Ouvrez l'emballage de la cassette-test en suivant la ligne perforée. Retirez l'emballage plastique.

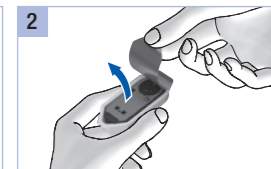

Retirez la nouvelle cassette-test de son emballage plastique.




Ouvrez le capot de protection.



Faites glisser le cran de sécurité du couvercle du compartiment de la cassette vers le haut dans le sens de la flèche.



Insérez la cassette-test dans le lecteur. Refermez le couvercle du compartiment de la cassette. Refermez le capot de protection.

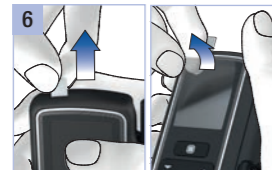

Retirez le film protecteur des piles par l'arrière du lecteur. Retirez le film protecteur de l'écran d'affichage.



Appuyez sur jusqu'à ce que le lecteur s'allume (env. 2 secondes).



Sélectionnez une langue (marquée en jaune) avec . Appuyez sur .



Appuyez sur .

2. Préparation de l'autopiqueur




Retirez l'embout de l'autopiqueur.



Insérez la nouvelle cartouche de lancettes en insérant d'abord la partie blanche.




Ne retirez **pas** la cartouche de lancettes avant que les 6 lancettes soient toutes utilisées.

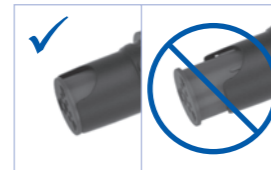

La cartouche de lancettes est correctement positionnée lorsqu'elle est entièrement insérée dans l'autopiqueur et que seul le bord saillant dépasse à l'avant.



Remplacez l'embout. L'embout est correctement inséré lorsqu'il a été glissé jusqu'à la butée et que l'utilisateur a senti et entendu que l'embout a été bien enclenché.

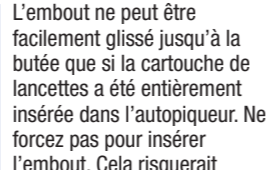

L'embout ne peut être facilement glissé jusqu'à la butée que si la cartouche de lancettes a été entièrement insérée dans l'autopiqueur. Ne forcez pas pour insérer l'embout. Cela risquerait d'endommager l'embout et l'autopiqueur. Corrigez plutôt la position de la cartouche de lancettes.



Réglez la profondeur de piqûre désirée en tournant l'embout de réglage de l'autopiqueur jusqu'à la position souhaitée.

Conseil : commencez le prélèvement par une profondeur moyenne de piqûre, par ex. 3.



Positionnement d'une nouvelle lancette : préparez l'autopiqueur pour le prochain prélèvement sanguin.

Faites coulisser le levier en direction de **A**, puis remplacez-le en position initiale **B**.

3. Effectuer une mesure de glycémie

Avant de procéder à une mesure de glycémie : veuillez respecter les importantes remarques à propos de la mesure de glycémie.



Lavez-vous les mains à l'eau chaude et au savon et rincez-les soigneusement.



Essuyez bien vos mains avec un chiffon propre avant de procéder à un prélèvement de sang.




Ouvrez le capot de protection.




Appuyez fermement l'autopiqueur contre le site de prélèvement choisi.




Enfoncez le bouton de déclenchement jusqu'à la butée.

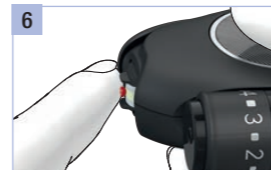

Effleurez d'un geste précis la zone réactive située entre les butées à l'extrémité de la cassette **uniquement** en son milieu avec la goutte de sang. Pour ce faire, effleurez légèrement les butées avec le doigt.

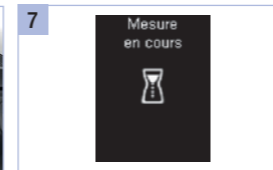

Enlevez votre doigt de la cassette-test dès que *Mesure en cours* s'affiche à l'écran.

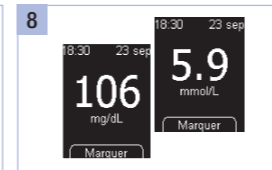

La mesure est terminée au bout de 5 secondes environ. Lisez le résultat glycémique et refermez le capot de protection.

Service après-vente

Belgique
Tél: 0800-93626 (Accu-Chek Service)
www.accu-chek.be

France
Service après-vente :
Numéro vert : 0800 27 26 93
www.accu-chek.fr

Suisse
Service clientèle Accu-Chek 0800 803 303
appel gratuit
www.accu-chek.ch

Mise à jour : 2020-01

0123

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK MOBILE et FASTCLIX sont des marques de Roche.

© 2020 Roche Diabetes Care

Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com